

CICATRIZADORES

DESCRIÇÃO:

O cicatrizador tem a função de remodelar o contorno gengival ao redor do implante para facilitar a moldagem. Verifique modelos e medidas na Tabela 01 abaixo.

São fabricados em Liga de Titânio ASTM F67. Apresentam diversos modelos e diâmetros que constam na Tabela 01 abaixo.

INDICAÇÃO DE USO A QUE SE DESTINA O PRODUTO

Os CICATRIZADORES são utilizados para proteger a plataforma e a região de conexão protética do implante, modelando o sulco gengival.

PRECAUÇÕES e ADVERTÊNCIAS

Os Cicatrizadores exigem procedimentos protéticos especializados, Deverão ser utilizados somente por profissionais adequadamente habilitados em implantodontia.

O uso do produto sem conhecimento das técnicas adequadas e/ou procedimentos e condições inadequadas, poderá prejudicar o paciente conduzindo a resultados não satisfatórios.

Efeitos adversos ocorrerão somente se houver escolha indevida dos componentes, podendo gerar danos à sequência protética sobre o implante a ser instalado.

Produto não estéril. Esterilizar antes do uso. Não utilizar o produto caso esteja fora prazo de esterilização.

Produto de uso único. Proibido Reprocessar.

Após o tempo de permanência do produto, retirar o Cicatrizador / Parafuso de Cobertura e descartar como material contaminado de acordo com a legislação vigente

Não utilizar o produto se a embalagem estiver violada.

Assegurar que o produto não seja engolido ou aspirado pelo paciente.

ARMAZENAMENTO

Deverão ser armazenados em local limpo e seco, longe da ação do sol, com temperatura inferior a 25°C.

TRANSPORTE

Devem ser transportados em ambiente limpo e seco, protegido da radiação solar direta, em temperatura máxima de 25°C.

DESCARTE DE MATERIAIS

Todos os materiais de consumo utilizados na cirurgia para instalação de implantes odontológicos deverão ser descartados conforme normas locais.

CONTRAINDICAÇÃO

Não apresentam contraindicações desde que suas finalidades e indicações sejam seguidas corretamente.

ESTERILIZAÇÃO

Produto comercializado não estéril devendo ser esterilizado pelo cirurgião dentista antes da utilização. A embalagem primária do produto é indicado para esterilização a vapor, devem ser esterilizados em autoclave. Recomenda-se seguir o método de esterilização por autoclave a vapor conforme os parâmetros e procedimentos estabelecidos na norma ABNT NBR 17665-1 Esterilização de Produtos para Saúde – Vapor. Parâmetros recomendados: 121°C, 20 min., Alternativamente, pode-se proceder conforme o manual de instruções do fabricante da autoclave

Esterilize os produtos na véspera ou no dia do procedimento

Fabricante Recomenda Uso Único

MANUSEIO

Abrir a embalagem e verificar a integridade do produto.

A técnica adequada para colocação dos cicatrizadores pode ser executada através de abertura de retalhos ou simplesmente pela remoção da gengiva ao redor do Implante através de punção, esta indicação depende das condições gengivais que o paciente apresenta tais como: quantidade de gengiva inserida, espessura de fibromucosa e altura gengival.

Verificar na ficha do paciente o modelo e diâmetro do implante para colocação do cicatrizador correspondente. Utilizar chave hexagonal 1.2 para instalação.

Não se deve ultrapassar 10 N.cm de torque.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Apresentam modelos com perfil reto ou emergente para as plataformas dos Implantes HE 3.3 / 4.1 e 5.0 com alturas de 2mm a 7mm.

Apresentam também modelos para os Implantes Cone Morse com diâmetro na cabeça de 3.3mm ou 4.5mm. Alturas de 0.8mm a 5.5mm.

FORMAS DE APRESENTAÇÃO

Este produto é acondicionado individualmente em embalagem primária tipo envelope esterilizável de filme e papel grau cirúrgico e embalagem secundária cartonada.

PRAZO DE VALIDADE

Indeterminado.

TEMPO DE PERMANÊNCIA

De 7 à 30 dias (necessários para a normalização da gengiva ao redor dos cicatrizadores).

	Prazo de validade		Manter afastado da luz solar	LOT	Código do lote	REF	Número de referência
SIZE	Tamanho do produto		Consultar as instruções - Para utilização		Manter seco		Não utilize se a embalagem estiver danificada
	Produto de uso único		Data de fabricação		Fabricante	 25°C	Temperatura máxima 25°C
Qty	Quantidade	MAT	Material de fabricação do produto	PROIBIDO REPROCESSAR	Requisito Brasileiro	Non-Sterile	Não Estéril

TABELA 01
LISTADE CICATRIZADORES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
14331001	Cicatrizador Cone Morse 3.3 Alt 0.8	14551037	Cicatrizador HE Divergente 4.1x5.5 Alt.2.0
14331002	Cicatrizador Cone Morse 3.3 Alt 1.5	14551038	Cicatrizador HE Divergente 4.1x5.5 Alt.3.0
14331003	Cicatrizador Cone Morse 3.3 Alt 2.5	14551039	Cicatrizador HE Divergente 4.1x5.5 Alt.4.0
14331004	Cicatrizador Cone Morse 3.3 Alt 3.5	14551040	Cicatrizador HE Divergente 4.1x5.5 Alt.5.0
14331005	Cicatrizador Cone Morse 3.3 Alt 4.5	14551041	Cicatrizador HE Divergente 4.1x5.5 Alt.6.0
14331006	Cicatrizador Cone Morse 3.3 Alt 5.5	14551042	Cicatrizador HE Divergente 4.1x5.5 Alt.7.0
14451007	Cicatrizador Cone Morse 4.5 Alt 0.8	14501043	Cicatrizador HE Divergente 5.0x5.7 Alt.2.0
14451008	Cicatrizador Cone Morse 4.5 Alt 1.5	14501044	Cicatrizador HE Divergente 5.0x5.7 Alt.3.0
14451009	Cicatrizador Cone Morse 4.5 Alt 2.5	14501045	Cicatrizador HE Divergente 5.0x5.7 Alt.4.0
14451010	Cicatrizador Cone Morse 4.5 Alt 3.5	14501046	Cicatrizador HE Divergente 5.0x5.7 Alt.5.0
14451011	Cicatrizador Cone Morse 4.5 Alt 4.5	14331049	Cicatrizador HE Paralelo 3.3 Alt.2.0
14451012	Cicatrizador Cone Morse 4.5 Alt 5.5	14331050	Cicatrizador HE Paralelo 3.3 Alt.3.0
14081080	Cicatrizador Cone Morse WideShort Alt.0.8	14331051	Cicatrizador HE Paralelo 3.3 Alt.4.0
14151081	Cicatrizador Cone Morse WideShort Alt.1.5	14331052	Cicatrizador HE Paralelo 3.3 Alt.5.0
14251082	Cicatrizador Cone Morse WideShort Alt.2.5	14411067	Cicatrizador HE Paralelo 4.1 Alt.2.0
14351083	Cicatrizador Cone Morse WideShort Alt.3.5	14411068	Cicatrizador HE Paralelo 4.1 Alt.3.0
14331013	Cicatrizador HE Divergente 3.3x3.75 Alt.2.0	14411069	Cicatrizador HE Paralelo 4.1 Alt.4.0
14331014	Cicatrizador HE Divergente 3.3x3.75 Alt.3.0	14411070	Cicatrizador HE Paralelo 4.1 Alt.5.0
14331015	Cicatrizador HE Divergente 3.3x3.75 Alt.4.0	14411071	Cicatrizador HE Paralelo 4.1 Alt.6.0
14331016	Cicatrizador HE Divergente 3.3x3.75 Alt.5.0	14411072	Cicatrizador HE Paralelo 4.1 Alt.7.0
14451031	Cicatrizador HE Divergente 4.1x4.5 Alt.2.0	14501073	Cicatrizador HE Paralelo 5.0 Alt.2.0
14451032	Cicatrizador HE Divergente 4.1x4.5 Alt.3.0	14501074	Cicatrizador HE Paralelo 5.0 Alt.3.0
14451033	Cicatrizador HE Divergente 4.1x4.5 Alt.4.0	14501075	Cicatrizador HE Paralelo 5.0 Alt.4.0
14451034	Cicatrizador HE Divergente 4.1x4.5 Alt.5.0	14501076	Cicatrizador HE Paralelo 5.0 Alt.5.0
14451035	Cicatrizador HE Divergente 4.1x4.5 Alt.6.0	14501076	Cicatrizador HE Paralelo 5.0 Alt.5.0
14451036	Cicatrizador HE Divergente 4.1x4.5 Alt.7.0		

Fabricado por **MSC Tecnologia Industrial Ltda.**

Rua: Frei Nicodemus Grundhoff, 285 Jardim Esmeralda CEP: 83.301-320 Piraquara – PR

Tel.:(41) 3018-0266 CNPJ: 08.875.513/0001-58

Responsável Técnico: Eng. Flávio Duarte de Almeida CREA-PR 19111/D

Registro ANVISA nº 80642710004

Instrução de Uso Cicatrizadores rev. 02